

# Mikrobac® forte

Aldehydmentes, tisztító hatású felületfertőtlenítő koncentrátum

## A termék tulajdonságai

- Aldehydmentes
- Habzásgátló adalékanyagot tartalmaz
- Kiváló anyag összeférhetőséggel rendelkezik a különleges védőfaktornak köszönhetően
- Semleges illat
- Kiváló tisztítóhatás

## Alkalmazási területek

A **Mikrobac® forte** használható egészségügyi és élelmiszeripari területeken mindennapi fertőtlenítésre és tisztításra. Alkalmazható minden vízálló, törölhető felületre, mint pl. bútorokhoz, berendezési tárgyakhoz, orvosi műszerekhez, továbbá falfelületekhez és padlóhoz. Széles hatásspektruma és semleges illata miatt ideális szer olyan illatanyag-mentességet igénylő területek fertőtlenítésére, mint:

- Műtők, műtőblokkok
- Koraszülött egységek
- Laboratóriumok
- Szülőszobák
- Dialyzáló helyiségek
- Intenzív ápolási egységek

A fentiekén kívül alkalmas még konyhákban, élelmiszer-feldolgozó üzemekben, mivel ezeken a helyeken aldehydmentes készítmények használata igényelt.

## Alkalmazási koncentráció és behatási idő

2,5%-os oldat – 5 perc behatási idő  
 1,5%-os oldat – 15 perc behatási idő  
 1%-os oldat – 30 perc behatási idő  
 0,5%-os oldat – 60 perc behatási idő  
 0,25%-os oldat – 240 perc behatási idő

Tuberkulocid hatás eléréséhez:

3%-os oldat – 30 perc behatási idő  
 2,5%-os oldat – 60 perc behatási idő

0,25%-os oldat alkalmazása - pl. közlekedők, irodák, előterek, lépcsőházak, kórtermek, kezelők, vizsgálók, ambulanciák fertőtlenítésére ajánlott (kivéve: transzplantációs egységek, kora- és újszülött osztályok, művese állomások); 0,5% - os oldat alkalmazása - pl.; kórtermek, kezelők, vizsgálók, ambulanciák fertőtlenítésére ajánlott; 1%-os és afölötti oldat alkalmazása - pl. műtők, ITO, PIC, kiemelt kockázatú egységek fertőtlenítésére ajánlott.

## Alkalmazási mód

A **Mikrobac® forte** egy koncentrátum. A megfelelő munkaoldat elkészítésének módja:

- pl. 8 liter vízbe 1 tasak (20 ml) = 0.25 %-os oldat.
- Az oldatot mindig hideg (kb. 20 C-os) vízzel készítsük!

A **Mikrobac® forte** oldatot használhatjuk manuálisan és gépi úton is.

A manuális úton történő alkalmazáshoz a hagyományos kórházi „két vödörös” módszer használatát javasoljuk cserélhető mopok alkalmazásával (kocsi rendszer). Ez a nedves mopos módszer biztosítja azt, hogy megfeleljünk a magas higiénés elvárásoknak, mely különösen szükséges azokon a területeken, ahol fennáll a fertőzés veszélye.

Alkalmazható továbbá automata tisztítóberendezésekhez (pl. egy- és többtárcsás gépek estén) is.





# Mikrobac<sup>®</sup> forte

Aldehydmentes, tisztító hatású felületfertőtlenítő koncentrátum

## Mikrobiológiai hatékonyság

Baktericid (pl. MRSA), yeasticid, tuberkulocid, valamint vírusinaktiváló hatású pl. HBV/HIV, Adeno, Polioma SV 40, Rota és Noro vírusokra.

## Összetétel

Ez a készítmény a két felületaktív anyag, a benzalkonium-klorid és a laurylamine dipropylenediamine együttes hatását használja ki, ezzel biztosítva a széleskörű hatékonyságot alacsony koncentráció esetén is.

## Aktív hatóanyag 100 g-ban:

20.0 g benzalkonium-kloridot, 5.0 g laurylamine dipropylenediamine

## Anyagkompatibilitás

Fémek

- Alumínium
- Réz
- Sárgaréz
- Rozsdamentes acél

Műanyagok

- Polietilén
- Polipropilén
- Akрил üveg
- Makrolon
- PVC
- Polistirén

Vizsgálati eredményekből az a következtetés vonható le, hogy ha előírás szerint alkalmazzuk, azaz mosással történő fertőtlenítésre, semmilyen anyagkárosodásra nem kell számítani. Még a kritikus anyagok, mint pl. az akril üveg és a Makrolon sem károsodtak a laboratóriumi vizsgálatok során.

## Kiszerezés

20ml, 5000 ml

## **HARTMANN-RICO HUNGÁRIA KFT.**

H-2051 Biatorbágy  
Paul Hartmann u. 8.  
Tel.:(+36) 23-530-950  
Fax: (+36) 23-530-905

*A kémiai anyagokat biztonságosan alkalmazza.  
Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást!*

